

Aesculap Tierschermaschinen

... Ihr zuverlässiger Partner in der Praxis!



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

www.aesculap.onlinezoo.at


Aesculap Tierschermaschine

Produkt - Vorteile


Handlich



Leise

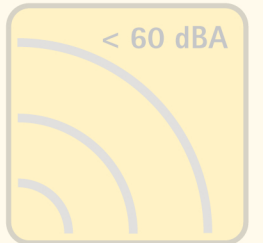

Wartungsarm

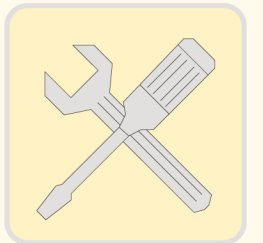


Made in Germany




Aesculap Tierschermaschinen

GT420 Isis

Antrieb	DC Motor ca. 5700 1/min
Spannung	220-240 V 50/60 Hz
Akku-Ladezeit	ca. 240 Min
Betriebsdauer	bis zu 40 Min
Schneidsatz	Aesculap Spezial
Schnittlänge	ca. 1,5 mm
Schnittbreite	24 mm
Gewicht	ca. 120 g
Ladeanzeige	Ladeanzeige in Ladestation
Lieferumfang	1 Aufsteckkamm, Bürste, Öl, Ladestation mit Werkzeug, Schermaschine, Gebrauchs- anweisung
Lautstärke	< 60 dBA

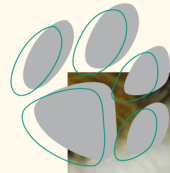

Venenpunktion

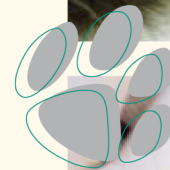

Inzision / Biopsie



Schwer zugängliche
Bereiche



...für die perfekte „Vorbereitung“!

GT410 Vega



Vorbereitung Ultraschall



Venenpunktion Pferde

Antrieb	DC Motor ca. 5700 1/min
Spannung	230 V 50 Hz
Akku-Ladezeit	ca. 120 Min Schnellladung
Betriebsdauer	bis zu 50 Min
Schneidsatz	Aesculap Spezial
Schnittlänge	3-fach verstellbar 0,5; 1,5 und 2,5 mm
Schnittbreite	40 mm
Gewicht	<250 g
Ladeanzeige	Direktanzeige auf Gerät
Lieferumfang	5 Aufsteckkämmе, Bürste, Öl, Ladestation, Schermaschine, Gebrauchsanweisung
Lautstärke	< 60 dBA



AESCULAP®

Pflegehinweise



Entfernen Scherkopf Vega

Scherkopf seitlich halten und mit Daumen mittig aus der Maschine drücken. Zum Einsetzen die beiden unteren Rastnasen in das Gehäuse einführen und Scherkopf einklappen.



Bürsten Scherkopf

Scherkopf mit leichten Bürstenbewegungen reinigen und Haarreste entfernen.



Ölen Scherkopf

Nach jeder Reinigung ist der Scherkopf zu ölen. Mit beigefügtem Öler einen Tropfen mittig und je einen seitlich auf dem Scherkopf aufbringen.



Entfernen Scherkopf Isis

Inbusschlüssel aus der Unterseite der Ladestation entnehmen und Schraube lösen. Scherkopf abnehmen. Reinigung und Ölen analog wie oben beschrieben. Scherkopf mit Rastung einsetzen und Schraube eindrehen.

Weitere Infos

Isis Pfotenschermaschine

Isis Ersatzscherkopf

Vega Schermaschine

Vega Ersatzscherkopf

bitte klicken.

Hinweis:
Blut, Eiter und Wundsekret können den Scherkopf verkleben. Nach jeder Anwendung den Scherkopf reinigen und ölen.

All rights reserved. Technical alterations are possible. This leaflet may be used for no other purposes than offering, buying and selling of our products. No part may be copied or reproduced in any form. In the case of misuse we retain the rights to recall our catalogues and pricelists and to take legal actions.

www.aesculap.onlinezoo.at

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Vet Care GmbH
Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Deutschland - Germany

schermaschinen@aesculap.de
www.bbraun-vetcare.de